

Conseils d'utilisation

Ne pas laisser à la portée des enfants ou des animaux.

Ne pas avaler.

Attention fragile, tube de verre.

Ne pas mettre en contact avec les vêtements.

Ne pas orienter vers une personne lors du dégonflage.

En cas de contact du réactif avec la peau ou les yeux,

rincer abondamment à l'eau.

A utiliser entre 10°C et 40°C.

Cet éthylotest est utilisable une seule fois quel que soit le résultat.

Ne pas conserver le produit usagé.

A jeter dans la poubelle déchets résiduels après utilisation
en raison de produits chimiques contenus dans le tube de réactif.

Gebruiksaanwijzingen

Niet binnen het bereik van kinderen of dieren bewaren.

Niet inslikken.

Let op: breekbaar, glazen buisje.

Niet in contact laten komen met kledingstukken.

De test niet naar een persoon richten bij het leegdrukken van de ballon.

Indien het reagens in contact is gekomen met de huid of de ogen,
overvloedig spoelen met water.

Te gebruiken tussen 10°C en 40°C.

Deze alcoholtest kan slechts éénmaal worden gebruikt,
ongeacht het resultaat.

De test niet bewaren na gebruik.

Gooi alles na gebruik in een vuilnisbak,
want het reagensbuisje bevat chemische producten.



PE / PP

Les résultats de ce test ne peuvent, en aucun cas,
être opposés à ceux obtenus lors de contrôles officiels.

en fonction du résultat d

Le fabricant

ou si les pré

des décisions prises par l'utilisateur,
à sa seule et unique responsabilité.
une alcoolémie de 0,5 ‰ de sang,
le seuil routier est multiplié par trois.
Le fabricant et les distributeurs dégagent toute responsabilité
si le produit est utilisé en dehors de sa destination
ou si les conditions d'emploi ne sont pas respectées.

De resultaten van deze test kunnen in geen geval worden gebruikt als
tegenbewijs voor de resultaten van officiële controles.

De beslissingen die de gebruiker neemt in functie van het resultaat van deze test
zijn enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Met een alcoholgehalte van 0,5 ‰ in het bloed,
ligt de kans op een verkeersongeval driemaal hoger.

De fabrikant en de verdelers zijn niet aansprakelijk indien het product voor andere
doeleinden wordt gebruikt, of indien de voorzorgsmaatregelen en de handleiding
niet worden nageleefd.



**Caractéristiques certifiées
selon la Norme NFX 20-702 :**

- Caractéristiques Techniques.
- Qualités Métrologiques maintenues malgré les variations de températures et des paramètres d'expiration.
- Essais de vieillissement thermique.

Gecertificeerde kenmerken

in overeenstemming met de norm NFX 20-702 :

- Technische kenmerken.
- Constante metrologische kwaliteiten ondanks temperatuurschommelingen en verschillende uitademparameters.
- Testen op het vlak van thermische veroudering.

AFNOR CERTIFICATION • 11, rue Francis de Pressensé • 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE cedex



contralco

TESTS ET CONTRÔLES CERTIFIÉS

BP 23 • 34150 GIGNAC FRANCE

Tél. 33(0)4 67 57 62 62 • Fax 33(0)4 67 57 68 12

www.contralco.fr • info@contralco.fr

France • Brevet déposé • Vervaardigd in Frankrijk • Gedeponneerd patent



Attendez au minimum
10 minutes
après avoir absorbé
une boisson alcoolisée.

Mode d'emploi ETHYLOTEST à usage unique


L'alcoolémie maximale est atteinte environ une heure après la dernière consommation d'alcool.
Interpréter le test entre 2 et 15 minutes après avoir vidé l'air du ballon par le tube.

Wacht minimum
10 minuten
na het nuttigen van
een alcoholische drank.

Gebruiksaanwijzing ALCOHOLTEST voor eenmalig gebruik

Het maximale alcoholgehalte wordt ca. één uur na het drinken van de laatste alcoholische consumptie bereikt.
Het resultaat van de test moet tussen 2 à 15 minuten na het legen van de ballon via het buisje worden afgelezen.

1

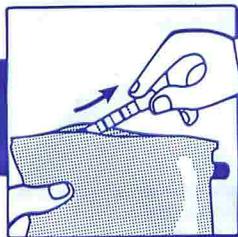

Sortir le tube du ballon
comme indiqué par la flèche.

Neem het buisje van de ballon
zoals aangegeven door het pijltje.


2



Gonfler le ballon
en une fois.

De ballon
volledig opblazen
in één keer.


3

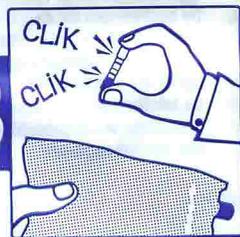

Enfoncer
les embouts
au maximum.

Druk de
opzetstukjes
zo ver
mogelijk in.


4

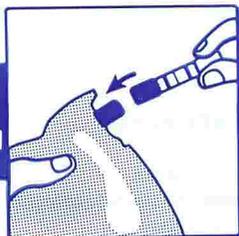

Insérer la partie
bleue du tube
dans l'embout du ballon.

Steek het blauwe deel
van het buisje in het opzetstukje
van de ballon.

5

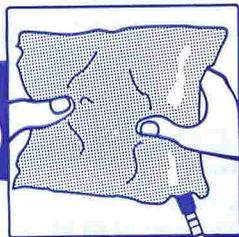

Vider le ballon
en 15 secondes
environ.

Druk de ballon
volledig leeg
in ongeveer
15 seconden.



Inférieur au seuil réglementaire
Lager dan het wettelijk toegestane gehalte



Supérieur au seuil réglementaire
**Vous êtes en infraction :
Ne conduisez pas**

Hoger dan het wettelijk toegestane gehalte
**U bent in overtreding :
Ga niet rijden**

En présence d'alcool, les cristaux de réactif se colorent en vert.
Si la coloration verte dépasse complètement l'anneau central,
vous êtes au-dessus du seuil réglementaire de 0,22 mg/litre d'air
équivalent à 0,5 ‰ de sang.

Bij aanwezigheid van alcohol kleuren de kristallen
van het reagens groen.
Indien de groene kleur volledig voorbij de middelste ring gaat,
dan bevindt uw alcoholgehalte zich boven de reglementaire
waarde van 0,22 mg/lucht,
wat gelijk staat aan 0,5 ‰ in het bloed.

